

Handleiding voor monsterafname

Speekseltest: 7 speekselmonsters

Is uw testpakket volledig?

Kijkt u a.u.b. na of uw pakket volledig is.
Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Monster begeleidingsformulier
- 1 Garantieformulier
- 7 gekleurde speekselbuisjes
- 7 Rietjes
- 7 Etiketten
- 2 Verzendsbuisjes
- 1 Verzendenvelop

Deze handleiding geldt voor de volgende testen:

Stressprofiel

Stressprofiel Plus

Test-Voorbereiding

Op de dag van de test moet u het volgende in acht nemen:

1. het speeksel niet met bloed vermengen bijvoorbeeld door tandvleesbloeding
2. geen mondwater / geen mondspoelingen toepassen
3. Direct voor de monsterafname de mond met helder water spoelen
4. voor het eerste speekselmonster niet eten of drinken
5. Speekselmonsters voor het tandenpoetsen of minimaal 30 min erna afnemen
6. De speekselmonsters, in de loop van de dag, 30 minuten na het eten of drinken nemen.
7. De speekselmonsters na het afnemen in de koelkast bewaren

Test-Uitvoering

De speekselmonsters moeten op dezelfde dag volgens onderstaand schema worden afgenomen:

Let op de kleuren, zie de volgende pagina!

Monster 1	direct na het ontwaken
Monster 2	½ uur na het ontwaken
Monster 3	1 uur na het ontwaken
Monster 4	2 uur na het ontwaken
Monster 5	5 uur na het ontwaken
Monster 6	8 uur na het ontwaken
Monster 7	12 uur na het ontwaken

1. Neem a.u.b. een rietje en speekselbuisje in de kleur overeenkomstig het schema rechts uit de verpakking (bijvoorbeeld monster 1: wit, monster 7: bruin).
2. Doe het speeksel door het rietje in een speekselbuisje. Het buisje moet minstens voor de helft met speeksel gevuld zijn. (schuim niet meetellen).
3. De dop van het speekselbuisje zorgvuldig sluiten. Het rietje kan bij het huisvuil.
4. Het bijbehorende etiket van datum, tijdstip en naam voorzien en deze op het speekselbuisje plakken.
5. Het speekselbuisje in een verzendbuisje doen en vervolgens in de koelkast bewaren tot aan het verzenden. Tot 4 speekselbuisjes kunnen in een verzendbuisje verstuurd worden.
6. Voor het verzenden neemt u de speekselmonsters uit de koelkast en doe deze met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvolp. Verzend deze per post aan ons laboratorium retour.



Monster 1

Monster 2



Monster 3

Monster 4



Monster 5

Monster 6



Monster 7

De retourzending moet bij voorkeur van maandag tot woensdag plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Let op voor retourzendingen vanuit België:

Retourzendingen vanuit België dienen voorzien te worden van de speciaal bijgevoegde adressticker. Deze dient men over het adres op de bijgevoegde verzendenvolp te plakken

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team



medivere GmbH Mainz
Vertengwoordigd door:
Yours Healthcare
Borculo

Telefoon: +31 - (0)88 - 00 75 777
of info@medivere.nl